

# OXYGENERA EVOLUTION

Echipament complet pentru

## TRATAMENTE FACIALE

8 Tehnologii într-un singur echipament






# OXYGENERA EVOLUTION

## ECHIPAMENT COMPLET

Oxygena EVO este un **ECHIPAMENT COMPLET**, dotat cu oxigen hiperbaric, microdermabraziune, scrubber facial, ultrasunete faciale, radiofrecvență cu role, masaj facial vacuumatic, endomasaj, mezoterapie și terapie LED în 7 culori.

### **OXYGENERA EVO ESTE EFICIENT ÎN ÎNGRIJIREA TENULUI!**

Acesta curăța profund pielea și porii într-un timp scurt, penetrează totodată nutrienți în straturile profunde ale pielii, iar radiofrecvența contribuie la sporirea cantității de collagen din piele ceea ce ofera efect de netezire a ridurilor și efect de lifting.

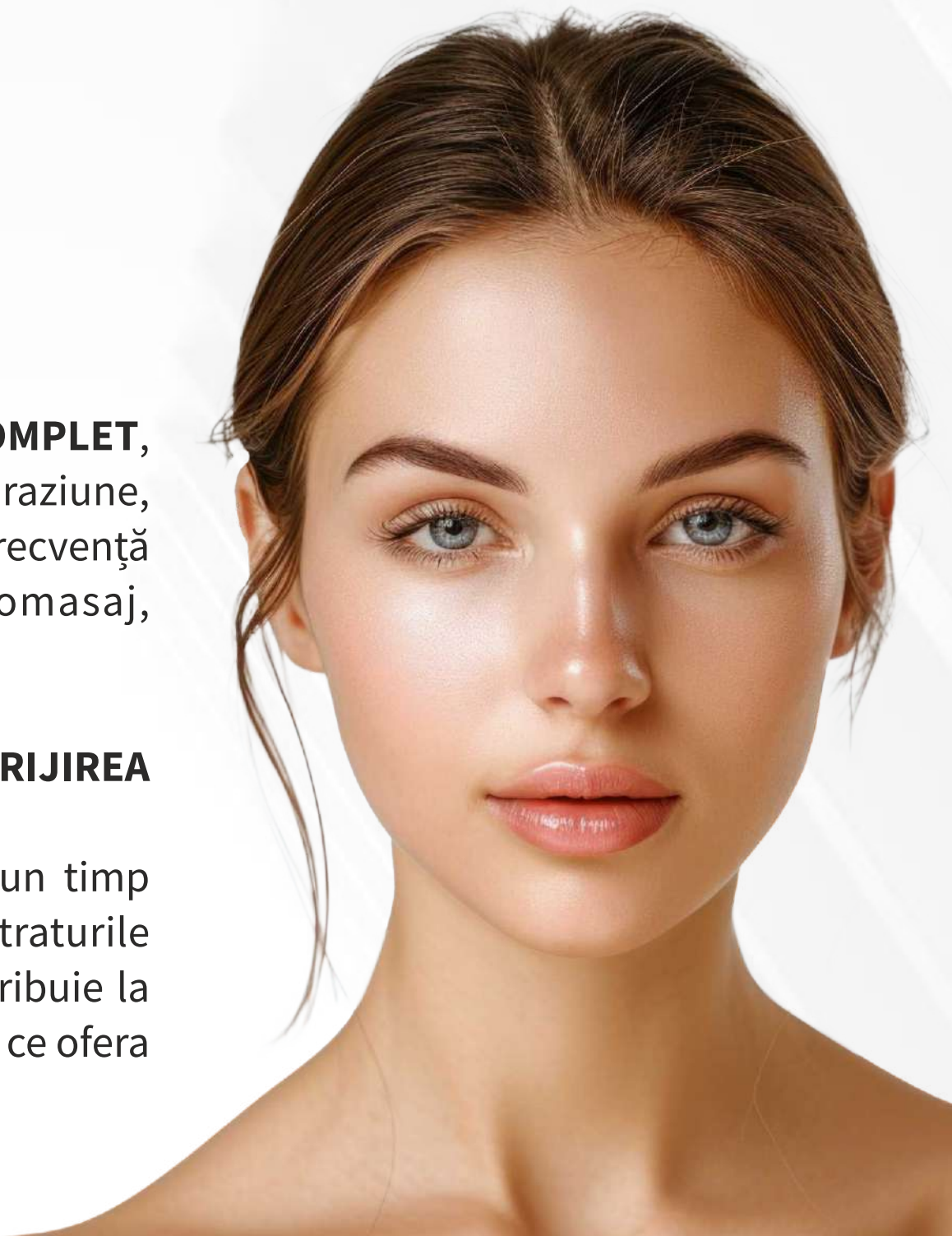



# OXYGENERA EVOLUTION

## 8 TEHNOLOGII ÎNTR-UN SINGUR ECHIPAMENT

### SKIN SCRUBBER



Utilizează unde ultrasonice și vibrații de înaltă frecvență care penetrează adânc pielea pentru a deschide porii și a curăța în profunzime tenul. Acesta îmbunătățește microcirculația, poate înlocui cu succes extracțiile, accelerează producția de colagen și ajută la absorbția eficientă a nutrienților din produsele cosmetice utilizate.

### MICRODERMABRAZIUNE CU PARTICULE DE DIAMANT



Acest tratament exfoliază profund pielea, stimulând producția de colagen și elastină, ajutând la regenerarea celulară, facilitând extracția punctelor negre și îmbunătățind condiția generală a pielii.

### OXYGEN JET



Oxigen de puritate 98%, sub presiune, este introdus în cele mai profunde straturi ale pielii. Datorită îmbunătățirii oxigenării celulare este stimulată circulația sanguină și regenerarea celulară, iar pielea este profund hidratată prin stimularea producției de colagen și elastină.



# OXYGENERA EVOLUTION

## 8 TEHNOLOGII ÎNTR-UN SINGUR ECHIPAMENT

### MASAJ FACIAL CU ULTRASUNETE



Ultrasunetele sunt vibrații mecanice care creează un micro-masaj al epidermei, modificând pH-ul acesteia și permițând în același timp o penetrare mai bună a substanțelor active. Vibrațiile produc un efect termic ușor, rezultând într-un efect decongestionant. Terapia cu ultrasunete este una dintre cele mai populare tratamente pentru imperfecțiunile faciale, având efecte mecanice, termice și chimice.

### MEZOTERAPIE



Acest tratament penetrează profund principiile active, crescând semnificativ permeabilitatea pielii atât pentru substanțe ionice, cât și non-ionice (inclusiv macromolecule), și acționează asupra structurilor lipidice pentru a deschide canalele transmembranare. Include două capete de tratament - mezoterapia perioculară și mezoterapia facială.

### MASAJ VACUUMATIC FACIAL



Echipamentul adoptă cea mai avansată tehnologie de presiune negativă cu turbină de mare viteză și tehnologie inovatoare de conversie tridimensională, combinând cu un ax patentat de role controlat de un microcip. Acesta are un efect antigravitațional asupra pielii. De asemenea, este echipat cu șase cupe de vacuum de diferite mărimi și forme, care activează circulația sanguină, realizează drenaj limfatic și are efect de lifting.



# OXYGENERA EVOLUTION

## 8 TEHNOLOGII ÎNTR-UN SINGUR ECHIPAMENT



### RADIOFRECVENȚĂ MULTIPOLARĂ

Undele electromagnetice emise, capabile să penetreze toate cele trei straturi ale pielii, pot crea un câmp electromagnetic care acționează asupra zonei tratate. De fapt, energia emisă este convertită în căldură, având potențialul de a atinge temperaturi de 60-65°C la nivelul țesutului în zona tratată.



### MASCA OXY-LED

Acest tratament stimulează activitatea celulară prin accelerarea metabolismului celular. El accelerează circulația sângelui, restabilește tonusul și elasticitatea pielii și are un efect puternic anti-îmbătrânire și de reparare profundă a pielii.



**Lumină PORTOCALIE 590-625nm:** ajută la revitalizarea pielii. S-a demonstrat că aduce vitalitate tenurilor pletorice și lipsite de viață. Lumina portocalie este bună pentru a conferi strălucire pielii.



**Lumină TURCOAZ 500-520nm:** agent antiinflamator pentru piele. Tratament calmant, vindecător și promovează vindecarea și întărește alte tratamente.



**Lumină GALBENĂ 565-590nm:** reduce apariția roșeaței, umflăturilor și inflamațiilor. Această culoare de lumină este benefică pentru rozacee și pentru tratamentul arsurilor, cum ar fi arsurile solare.



**Lumină ROȘIE 625-700nm:** are capacitatea de a pătrunde în toate straturile pielii, unde revitalizează, stimulează producția de colagen, favorizează repararea celulară și crește circulația.



**Lumină VERDE 520-510nm:** este absorbită de piele unde are un efect calmant. Ajută la reducerea petelor de hiperpigmentare, dezvăluind un ten mai luminos.



**Lumină MOV 400-420nm:** favorizează regenerarea celulară. Reduce anomaliile de la nivelul ADN-ului celular, astfel susține formarea celulelor cu potențial de regenerare, a celulelor stem.



**Lumină ALBASTRĂ 440-500nm:** s-a dovedit că are proprietăți antibacteriene puternice, capabile să omoare bacteriile care cauzează acneea. Previne și tratează acneea ușoară până la moderată. Lumina albastră ajută la purificarea pielii, stabilizează glandele sebacee și calmează inflamația.



**OXYGENERA  
EVOLUTION**

# BENEFICII

- **Îmbunătățirea calității pielii:** Utilizarea microdermabraziunii și a terapiei cu ultrasunete poate îmbunătăți textura pielii prin eliminarea celulelor moarte și stimularea producției de colagen.
- **Rejuvenare facială:** Tehnologia de radiofrecvență ajută la rejuvenarea pielii și reducerea, oferind un efect de lifting vizibil.
- **Hidratare profundă:** Tratamentul cu oxigen hiperbaric oferă pielii nutrienți esențiali, rezultând o hidratare profundă care lasă pielea netedă.
- **Detoxifiere și Tonifiere:** Masajul vacuumatic facial îmbunătățește circulația sanguină și ajută la drenajul limfatic, contribuind la eliminarea toxinelor și oferind un efect de tonifiere și fermitate a pielii.
- **Tratament personalizat cu LED:** Terapia LED în 7 culori permite tratamente personalizate în funcție de nevoile specifice ale pielii, tratând o varietate de probleme ale pielii, de la acnee la roșeață și îmbătrânire prematură.



**OXYGENERA  
EVOLUTION**

# STEP BY STEP

- **Demachierea:** Primul pas în efectuarea unui tratament facial este îndepărtarea machiajului, alegând un demachiant adecvat tipului de piele al clientului. După îndepărtarea machiajului și a impurităților, curățăm fața cu un toner.
- **Skin Scruber:** Se recomandă utilizarea unei spatule ultrasonice pentru îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, curățarea porilor și eliminarea punctelor negre.
- **Microdermabraziune:** Se selectează un cap de abraziune adecvat tipului de piele și zonei care urmează să fie exfoliată.
- **Oxigen hiperbaric:** Utilizând aerograful pentru a pulveriza oxigen hiperbaric, acesta penetrează în straturile cele mai profunde ale pielii, împreună cu substanțe active atent selecționate.
- **Ultrasunete faciale:** Datorită efectului mecanic de vibrație, facilitează absorbția principiilor active, oferă un efect decongestionat.
- **Mezoterapia virtuală:** Ajută la penetrarea ingredientelor active și este o tehnologie care crește permeabilitatea pielii.
- **Masajul cu vacuum:** Masaj endermologic realizat cu ajutorul cupelor speciale de masaj, ce activează circulația limfovenoasă, ajută la decongestionarea țesuturilor și oferă efect de lifting.
- **Radiofrecvență multipolară:** Oferă un efect instant de lifting. Datorită capătului său de tratament inovator, cu rotație de 360°, procedura este mult mai ușor de realizat, iar rezultatele sunt uimitoare.
- **Radiofrecvență:** Radiofrecvența tratează țesuturile într-un mod precis, îmbunătățind circulația sanguină și producția de colagen, pentru că temperatura dermului poate ajunge până la 65°C, în timpul tratamentului, obținem un efect de lifting instant.
- **Masca Oxy-LED:** Îmbunătățește activitatea celulară prin stimularea pielii pentru a secreta o cantitate mare de proteine decolagen.



# OXYGENERA EVOLUTION



## ROMANIA

**Adresă:** Bd. Libertății, Nr.22, Sector 5, București  
**Telefon:** 0729.005.777 | **E-mail:** office@beautyone.ro



BEAUTYONEROMANIA



WWW.BEAUTYONE.RO

## BULGARIA

**Адрес:** Ул. Хан Аспарух, №. 7, София  
**Телефон:** 0883335173 | **E-mail:** office@beautyone.bg



BEAUTYONEBG



BEAUTYONEBULGARIA



WWW.BEAUTYONE.BG