

# INFINITY LASER

755NM • 808NM • 1064NM

Cel mai performant sistem de

## EPIILARE DEFINITIVA

**3 LUNGIMI DE UNDA • PUTERE 3000W**

CEA MAI RAPIDA SI SIGURA METODA DE A  
SCAPA DEFINITIV DE PARUL NEDORIT



# INFINITY LASER

---

755NM • 808NM • 1064NM

Una dintre cele mai populare tehnici de epilare definitiva in societatea moderna este fotoepilarea cu laser. Aceasta tehnica se bazeaza pe principiul fototermolizei selective si consta in aplicarea luminii laser in zona tratata.

Lumina laser este absorbita de melanina din firul de par, unde aceasta energie se transforma in caldura. Aceasta interactiune duce la leziuni termice care afecteaza in mod direct celulele stem din regiunea umflata a foliculului de par si radacina acestuia.



# SINERGIA CELOR 3 TEHNOLOGII

# INFINITY LASER

755NM • 808NM • 1064NM

**Infinity Laser** ofera rezultate rapide de indepartare a parului nedorit datorita sinergiei celor mai eficiente 3 lungimi de unda: **755 nm, 808 nm, 1064nm**. Actiunea simultana, a celor 3 lungimi de unda, are ca efect distrugerea firelor de par indiferent de grosimea si culoarea acestora.

- **755nm LASER ALEXANDRITE:** Conform studiilor de specialitate, laserul Alexandrite este eficient si in tratarea persoanelor cu ten deschis la culoare (fototip cutanat I-III). Spre deosebire de alte lungimi de unda, lungimea de 755 nm (Alexandrite) este eficienta si in cazul firelor de par mai subtiri, putin pigmentate, cum ar fi cele de la nivel facial, fiind utilizat in prezent cu succes in cele mai mari clinici de specialitate din lume.
- **810nm LASER DIODA:** Lungimea de unda de 800-810nm s-a dovedit o optiune de tratament mai buna decat alte lasere, necesita sesiuni mai mici, mai putin dureroase si mai eficiente, deoarece patrunde mai adanc si punctul termic generat este mai crescut. Fototipurile I si II necesita fluente mai mari si durata mica a pulsului, in timp ce fototipurile de piele mai inchise la culoare (tip IV, V, VI) necesita mai putine fluente si o durata mai lunga a pulsului pentru a evita ranirea pielii.
- **1064nm LASERUL ND: YAG:** Lungimea de unda de 1064nm are capacitatea de a genera caldura in straturile profunde ale pielii si reprezinta solutia ideala in cazul persoanelor cu piele inchisa la culoare. Laserul Nd: YAG este, in general, ineficient pentru parul deschis la culoare (blond / gri).



# INFINITY LASER

755NM • 808NM • 1064NM



## VARIANTA 1

### ECHIPAMENT PREVAZUT CU:

2 capete de tratament

- Capat de tratament 15x15mm (755nm)
- Mini-Tips 8mm (pentru zone mici)
- Capat de tratament 15x25mm (755nm, 808nm, 1064nm)
- Hair Analyzer

**Sistem de operare ANDROID**

## VARIANTA 2


### ECHIPAMENT PREVAZUT CU:

1 capet de tratament

- Capat de tratament 15x25mm (755nm, 808nm, 1064nm)
- Hair Analyzer

**Sistem de operare ANDROID**

**VARIANTA 2025 DISPUNE DE UN  
MANIPUL NOU LA CARE SE POT  
ATASA CAPETE INTERSCHIMBABILE  
DE DIMENSIUNI DIFERITE**

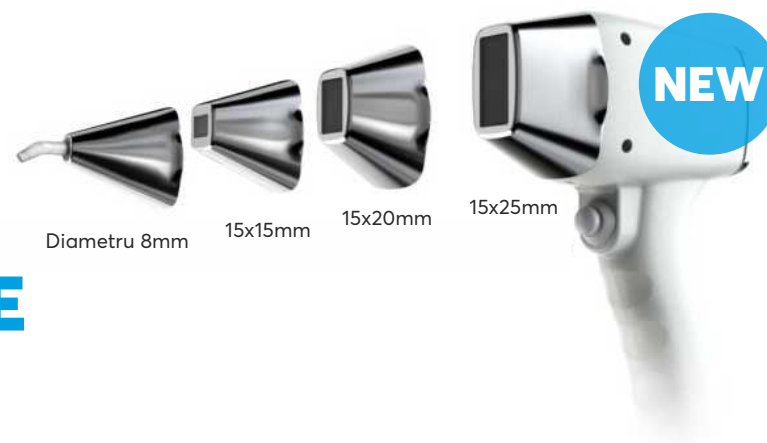

# INOVATII TEHNOLOGICE

# INFINITY LASER

755NM • 808NM • 1064NM



## HAIR ANALYZER

Dispozitiv avansat ce detectează, cu ajutorul unei camere de înaltă rezoluție, structura firului de păr în detaliu. Oferă informații precise despre grosimea, culoarea și densitatea firului de păr, fiind esențial în stabilirea optimă a parametrilor de lucru pentru proceduri de epilare în diverse zone ale corpului. Dispozitivul, integrat în echipamentul Infinity Laser, este unic și ideal pentru orice zonă a corpului, oferind siguranță și precizie. Tehnologia avansată, asigură o evaluare personalizată și exactă, garantând astfel eficiența și rezultatele optime ale tratamentului.



## TOUCH SCREEN INTUITIV

- Ajustarea parametrilor de lucru în timpul tratamentului.
- Monitorizarea numărului de impulsuri.
- Ajustarea sistemului de răcire.
- Sistem inteligent de selecție a spectrului de acțiune în funcție de zona tratată (S/M/L/XL)
- Dispune de 3 moduri de operare ce permite realizarea tratamentului eficient și sigur (SHR Stack / SHR / HR)



## SISTEM ANDROID

Permite controlarea aparatului direct de pe telefonul mobil.

# INFINITY LASER

755NM • 808NM • 1064NM

# STEP BY STEP

INFINITY  
LASER

755NM • 808NM • 1064NM

- Se recomanda realizarea unei **sedinte de evaluare** inainte de inceperea tratamentului astfel incat terapeutul sa poata stabili un protocol personalizat in functie de zona tratata (densitatea firelor de par, culoarea acestora si grosimea).
- **Curatati zona tratata si faceti fotografii.** Se recomanda ca parul sa fie ras cu cca. 3 ore inainte de realizarea sedintei de tratament.
- **Se stabilesc parametrii de lucru:** fototipul, intensitatea si frecventa .
- **Zonele cu alunite se vor proteja** folosind un creion alb, iar pe **zona unde sunt tatuaje nu se aplica tratamentul** deoarece se produc arsuri.
- Se aplica un strat de **gel conductor**, capatul de tratament trebuie sa fie in contact permanent cu pielea clientului pe tot parcursul expunerii luminii laser.
- Atat operatorii, cat si pacientii, **trebuie sa foloseasca ochelari de protectie** in timpul tratamentului, pentru a nu afecta ochii.

# AVANTAJE

## INFINITY LASER

755NM • 808NM • 1064NM



Sistem de operare Android cu ecran touch screen de 15.6".



Sistem avansat de racire de ultima generatie prin microcanale.



Potrivit pentru toate fototipurile I-VI si toate anotimpurile.



Versatil. Capete de tratament cu marimea spotului diferita.



Durata de viata mare a capatului de lucru 80-100 de milioane de impulsuri.



Cele mai eficiente 3 lungimi de unda din industrie.



Elimina definitiv parul nedorit, chiar si cel subtire si deschis la culoare.



Mod de selectie personalizat in functie de sex-ul clientului.



Eficienta crescuta. Energia este focusata, impulsuri scurte cu putere mare.



Tratament nedureros- datorita sistemului de racire avansat.



Siguranta. Ajustarea parametrilor de lucru ce permite realizarea tratamentului in orice anotimp.



Timp redus de lucru. Datorita celor doua capete de tratament cu dimensiuni diferite acoperim suprafete mari intr-un timp scurt de lucru.

# INFINITY LASER

---

755NM • 808NM • 1064NM



**Adresa:** Bd. Libertatii, Nr.22, Sector 5, Bucuresti  
**Telefon:** 0729.005.777; 0726.244.453  
**Email:** office@beautyone.ro | **Web:** www.BeautyOne.ro