

Novoxel[®]



Novoxel®

NOUA GENERAȚIE DE ECHIPAMENTE DERMATO-ESTETICE CE FOLOSEȘTE ABLAȚIA FRAȚIONATĂ, OFERIND PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL ÎNTINERIRII STRUCTURALE.

TMA® este o tehnologie special dezvoltată de Novoxel®, care se remarcă prin inovație atât în concept, cât și în execuție. Tehnologia brevetată, non-laser și fracționată, transferă energia termică către piele foarte rapid și în siguranță. Energia este emisă printr-o matrice de pini mici, în formă de piramidă, realizate din materiale biocompatibile, acoperind o zonă de tratament de 1 cm². Aceasta este încălzită la o temperatură de 400°C, asigurând autosterilizarea ei.

Tixel® este potrivit pentru toate tipurile de piele și pentru o gamă largă de tratamente estetice și medicale, tehnologia sa patentată neinvazivă și rezultatele clinice fiind susținute de numeroase publicații. Versatil, ușor de utilizat și cu un design ergonomic, Tixel® este ideal pentru orice clinică.

ECHIPAMENTE REVOLUȚIONARE DE REJUVENARE CU ABLAȚIE FRAȚIONATĂ



Tixel reprezintă o soluție inovatoare în terapia dermatologică, utilizând ablația termomecanică pentru regenerarea profundă a pielii și tratarea eficientă a unor probleme complexe precum acnee, cicatrici, melasma și semne de îmbătrânire, garantând o recuperare rapidă și sigură fără emisia de radiații.

Tixel oferă o abordare revoluționară în rejuvenarea cutanată prin transferul de energie termică precis controlată, care stimulează procesele naturale de vindecare ale pielii, reducând ridurile, coagulând vasele superficiale și eliminând imperfecțiunile, fără durere și efecte secundare semnificative.

Mezotix este un sistem fracțional de ultimă generație pentru rejuvenarea pielii, care transferă căldură naturală în mod rapid și sigur, stimulând regenerarea celulară epidermică și colagenul din derm, fără radiații și cu o perioadă scurtă de recuperare. Sistemul Mezotix, portabil și ușor de utilizat, este echipat cu un vârf steril din titan, oferind tratamente eficiente.



TEHNOLOGIE AVANSATĂ PENTRU ÎNTINERIREA PIELII

Tixel este un nou sistem de întinerire fracționată non-ablativă și ablativă, alimentat de tehnologia brevetată Novoxel cu vârf de titan. Tixel tratează pielea delicată a feței, inclusiv pielea periorbitală, a pleoapelor, a gâtului și a decolteului, în siguranță și rapid, cu durere redusă și 0-2 zile de repaus. Tixel utilizează căldura directă și nu produce radiații.

Tratamentul Tixel este o procedură dermato-estetică de ultimă generație ce se bazează pe tehnologia de absorbție termo-mecanică. Mai precis, folosește căldură pentru a stimula producția de colagen cu scopul de a îmbunătăți aspectul pielii.



TRATAMENTE MULTIPLE

Întinerirea pielii, ridurile ochilor, pori dilatați, acnee, vergeturi.



ZONE MULTIPLE

Față, gât, decolteu mâini, brațe & corp.



DURERE SCĂZUTĂ

Cremele analgezice pot fi folosite, de obicei nu sunt necesare.



VÂRF DE TITAN STERIL

Vârful este biocompatibil și steril în timpul tratamentului.



MIC ȘI PORTABIL

Mic și ușor de transportat.



FĂRĂ RADIAȚII

Tixel degajează căldură directă și nu emite radiații.

Linii de "îngrijorare" pe frunte

Liniiile glabelare "încruntate"

Liniiile pleoapelor

Cicatrici de acnee

Liniiile buzelor

Bărbie încrețită

Liniiile periorbitare

Pliuri nazale (linii de zâmbet)

Pilul nazolabial

Pliurile gâtului

Patentat & Validat științific

Energia termică este transferată către piele printr-un vârf de titan fierbinte. Transferul de căldură se face prin contact. Vârful nu perforază țesutul. Nivel scăzut de durere și recuperare rapidă.



Aplicator
PERIORBITAL




Aplicator
FACIAL

Tratamentul se aplică cu ajutorul unui vârf fie de 81 (vârf standard, 1cm²) sau 24 (vârf mic, 0,3cm²) din titan biocompatibil de calitate implantologică. În timpul operării, vârful este încălzit de un dispozitiv ceramic plat aflat la bază la o temperatură de 400°C, oferind un mijloc inerent de dezinfectare. Un tratament facial cu vârful standard necesită aproximativ 400 de impulsuri și durează aproximativ 15-20 min. Aplicatorul este livrat inițial cu un număr de 25.000 de impulsuri, după acest prag se pot achiziționa câte 10.000 de impulsuri. Costul per impulsuri extra este menționat în lista de pret echipament.

Proiectat pentru a livra un număr maxim de 250.000 de impulsuri (aproximativ 700 tratamente faciale), capatul de tratament va fi schimbat gratuit când acest prag este atins. Pentru înlocuirea gratuită este necesară returnarea capatului uzat. Vârful este montat în interiorul aplicatorului, permițând o mișcare precisă.


Histopatologie: Durata pulsului în MS

Intensitatea tratamentului este controlată cu precizie prin timpul de contact vârf-țesut (sau durata impulsului). Cu cât durata impulsului este mai mare, cu atât mai mare este cantitatea de energie transferată către țesut.

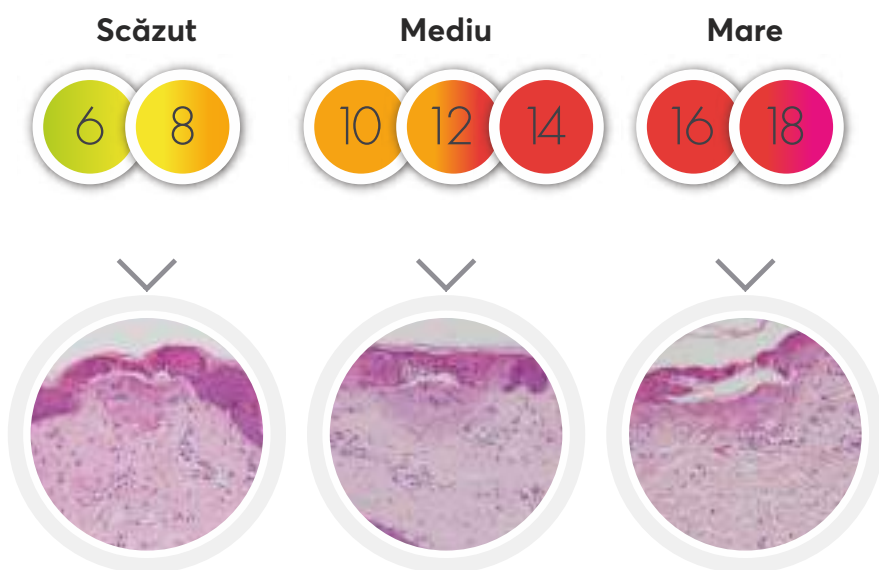

Absorbție îmbunătățită în epidermă

Vârful deshidratează și fracturează stratul cornos, cu o coagulare minimă la bază.

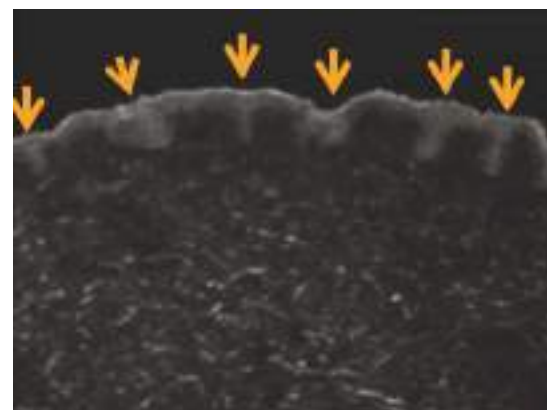

Recomandat pentru:

- Keratoză actinică*
- Riduri și linii fine
- Decolorarea pielii
- Piele afectată de soare
- Tonusul și textura pielii
- Îmbunătățirea aspectului pleoapelor superioare
- Pete de vârstă
- Vergeturi / striații

Beneficiile TIXEL:

- Distribuirea ședințelor de tratament - la 1 lună distanță între ele
- Program de tratament: 3 - 4 ședințe
- După tratament pielea este ușor umflată și roșie timp de 3 - 4 ore
- Pacienții prezintă un ușor eritem și senzație de căldură timp de 2 - 3 ore
- Timpul de repaus de la 0 la 2 zile, în funcție de intensitatea tratamentului
- Micro cruste apar a doua zi, dispar după aproximativ 3 zile
- Îmbunătățirea texturii pielii, aspect mai tânăr, reducerea ridurilor
- O mai bună definire a pleoapelor
- Satisfacție ridicată a pacienților, toate tipurile de piele



Transferul direct de căldură prin conducție

Tixel utilizează un vârf din titan ce conține 81 de piramide minuscule, asemănătoare unor ace ce se încălzesc până la 400°C simultan căldurii generate de un echipament laser.

- **Carcasa:** aliaj de titan
- **Baza:** cupru placat cu aur 9x9 piramide, 1 cm²
- **Sursă:** încălzitor electric ceramic
- **Temperatura:** menținută la 400°C





Parametrii de transfer de căldură


Tixel are o mișcare asemănătoare pistonului și atinge pielea pentru foarte scurt timp, energia termică este transferată în straturile superioare creând astfel pori minusculi.

Tocmai această microleziune este cea care stimulează producția de collagen nou, în modul ablativ Tixel creează micro canale superficiale, lezând controlat pielea și stimulând astfel procesul de vindecare ce determină producția de collagen și elasticitate a pielii. Tixel acționează în interiorul dermului, creând astfel canale deschise ce duc la transferul serurilor și agenților topici în piele.

Rezistența termică

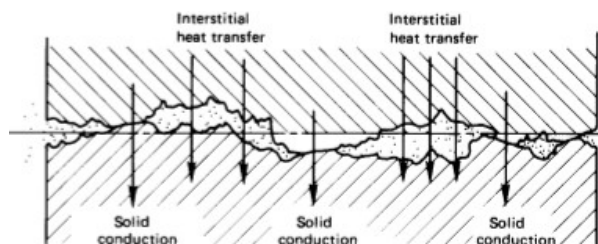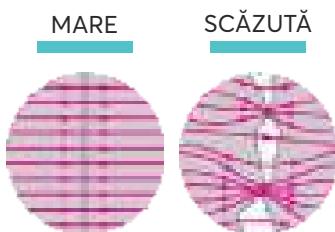

Transferul de căldură prin planul de contact între 2 suprafețe solide.

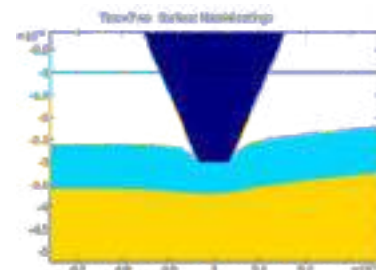

Vârful nu perforază mecanic țesutul.

- Tixel transferă exclusiv energia termică pielii (doar căldură, nici un fel de radiație) într-un mod foarte sigur și rapid, fără durere, bazat pe ablație termomecanică.
- Energia este emisă printr-o matrice de piramide încălzite la o temperatură ridicată (400 grade C).
- Pini dispozitivului sunt introduși la o adâncime și cu o viteză exact stabilite.



O proeminență mai mare reduce golurile de aer pentru o mai bună potrivire termică. Energia termică este apoi transmisă pielii după un contact rapid de câteva milisecunde. Apa este evaporată instantaneu, rezultând formarea unor pori minusculi pe zona tratată.

Avantajele echipamentului

- Biocompatibil la temperaturi ridicate
- Fără coroziune
- Ușor de curățat (TiO₂)
- Durabil la temperaturi ridicate
- Fără consumabile (se folosesc impulsuri)
- Sterilitate în timpul tratamentului - validat în conformitate cu ISO 20857:2010
- Față de alte tehnologii similare, Tixel asigură o vindecare mult mai rapidă și sigură
- Nedureros față de alte tehnologii similare.


Val de căldură emisferic

Valul de căldură este emisferic. Temperatura la suprafață este de 400°C. Adâncimea de coagulare este de 200-250μ. Gradientul de temperatură este de la 400 la 60°C.

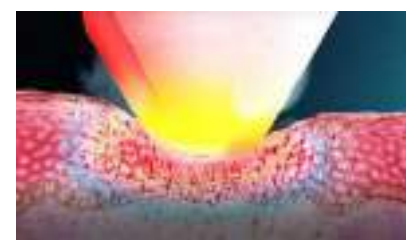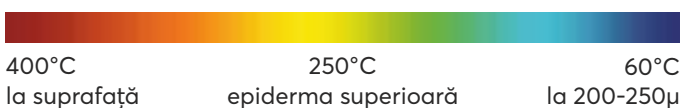

Tixel vs. Radiofrecvență & Laser fracționat


- Tixel folosește ablația fracționată, depășind în performanță laserul fracționat.
- Față de tratamentul ablativ cu laser CO₂, tratamentele obișnuite cu tixel sunt fără necroze epidermale sau depozite de carbon, ceea ce asigură o vindecare mult mai rapidă și sigură.
- Tixel nu folosește ace, nu provoacă arsuri sau sângerări
- Tratament puțin dureros
- Recuperarea este net superioară tratamentului cu laser, lipsa semnelor vizibile pe parcursul perioadei de vindecare; cruste milimetrice mult mai fine și discrete.
- Rezultate spectaculoase vizibile mai rapid decât la tratamentul cu laser.

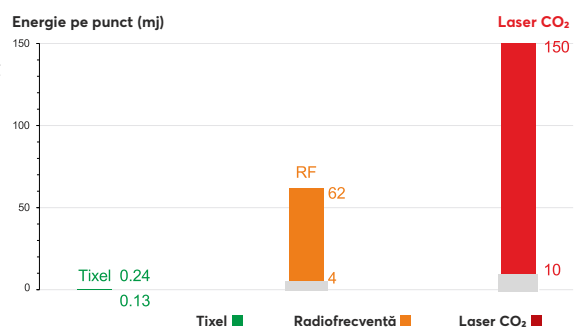

Senzori de durere în piele: Tixel vs. Laser

Laserul CO₂ aplică impulsuri foarte scurte (μs) pe piele. Lumina laserului este absorbită de apă, rezultând un nivel ridicat de temperatură și explozii Fibrele Delta transmit semnale către creier.

Tixel aplică impulsuri lungi (ms) pe piele. Căldura este absorbită de apă care se vaporizează treptat. Rezultatul este o senzație de durere scăzută transmisă de fibrele "C" din creier.

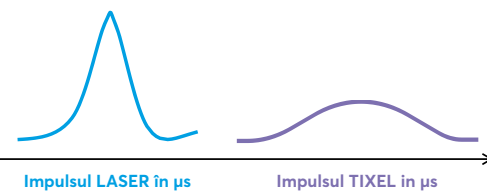

Tixel aplică căldura prin ștampilare. Senzație unică de durere pe unitate de suprafață.



Laserul CO₂ scanează fascicululul. Senzații de durere multiple pe unitate de suprafață.

Tixel: Efecte uniforme discrete

Transferul de căldură care nu este legat de umiditate sau de cromofori ceea ce face ca tratamentul să fie mult mai sigur, toată energia se emite în straturile profunde ale pielii fără nici un fel de radiații.

- Efectul fracțional
- Fără carbonizare
- Fără sângerare



Tixel: Vindecarea rănilor


- TMA (Tixel) a revoluționat domeniul dispozitivelor fracționate, în special în cazul tipurilor de piele închisă la culoare, deoarece nu sunt vizați cromofori, fiind extrem de sigur pe toate fototipurile.
- Procedurile de vindecare a rănilor care au loc după ablația cutanată TMA seamănă cu modelele deja cunoscute de laser CO₂ fracționat sau de radiofrecvență ablativă bipolară.
- În TMA, am observat o amprentă vindecată, deja după 14 zile. În cazul laserului CO₂, 100% și 89,5% din leziunile cutanate erau încă vizibile în ziua 21 după ablație, atunci când au fost tratate cu doze mari, respectiv mici.
- În RF, la 14 zile după tratament, leziunile subepidermice au putut fi observate, de asemenea, la toți pacienții tratați.
- TMA a fost bine tolerată de către pacienți și au fost observate doar simptome cutanate minore. În comparație cu alte tehnici de ablație cutanată, cum ar fi laserul CO₂ fracționat, simptomele au fost de intensitate minoră și au durat mai puțin.
- Sesiunile la mai puțin de 4 săptămâni ar putea fi recomandate din punct de vedere clinic, dar nu ar trebui să fie făcute mai devreme de 2 săptămâni.

Tixel vs alte tehnologii

Comparații cu alte tehnologii în ceea ce privește durerea, siguranța tratamentului, sterilitatea și modul de acțiune sau eficacitatea:

Caracteristică	TIXEL	LOASER CO ₂	RADIOFRECVENȚĂ
Tipuri de piele	Toate	I-IV	Toate
Timp de nefuncționare	Scurt	Lung	Mediu
Durere post tratament	Scăzut	Mare	Moderat
Steril	Steril	Steril	NU
Fum	NU	DA	NU
Miros	Ușor	Puternic	Moderat
Sângerare	NU	NU	Uneori
Siguranță pentru ochi	DA	NU	DA
Piele subțire	DA	NU	DA
Produse de unică folosință	NU	NU	DA
Compact	DA	NU	DA
Canale deschise	DA - Superficial	DA - Adânc	N/A

TIXEL: REZULTATE GARANTATE

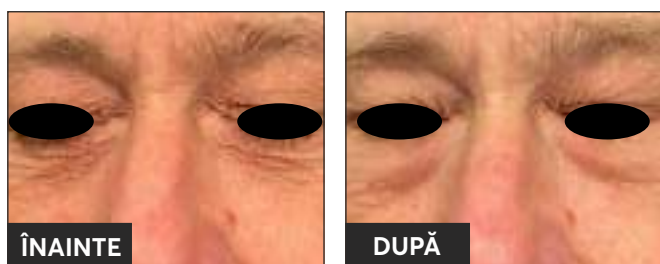

PLEOAPA SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ

- Femeie, 65 de ani
- Urmărit la 4 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



RIDURILE OCHILOR

- Femeie, 53 de ani
- Urmărit la 5 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



CEARCĂNE

- Femeie, 42 de ani
- Urmărit la 6 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



ACNEE

- Femeie, 23 de ani
- Urmărit la 3 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



MELASMA

- Femeie, 27 de ani
- Urmărit la 4 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



ROSACEE

- Femeie, 45 de ani
- Urmărit la 4 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



GÂT

- Femeie, 46 de ani
- Urmărit la 5 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



DECOLTEU

- Femeie, 40 de ani
- Urmărit la 4 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică

TIXEL: REZULTATE GARANTATE



CICATRICI DE ACNEE

- Femeie, 22 de ani
- Urmărit la 4 săptămâni după 3 Tixel
- Fără întrerupere
- Fără anestezie topică



ACNEE

- Femeie, 22 de ani
- Urmărit la 30 de zile după 4 Tixel
- Fără timp de nefuncționare
- Fără anestezie topică



TRATAMENT FACIAL

- Femeie, 66
- Urmărit la 7 luni după 4 Tixel
- 1 zi de repaus
- Fără anestezie topică



TRATAMENT FACIAL

- Femeie, 57 de ani
- Urmărire 1 an după 4 Tixel
- 1 zi timp de oprire
- Fără anestezie topică

TIXEL: SPECIFICATII TEHNICE



tixel[®]

- **1 Aplicator:** Standard
(Înainte de schimbarea unuia din aplicatori cu celalalt, echipamentul trebuie să se răcească timp de 6 minute)
- **OPTIONAL:** aplicator periorbital
- **Tip de energie:** Încălzire directă
- **Vârf de titan:** DA
- **Sfat Zona de acoperire a vârfului:** 1 cm² (vârful feței), 0,3 cm² (vârful periorbital)
- **Greutatea sistemului (fără HP):** 4.5 Kg
- **Greutatea aplicatorului:** 330 g
- **Dimensiune consolă:** 26x29x24 (LxIxH)
- **Setări:** 5 -16 ms, 200 - 800 ym



tixel[®] 2

- **2 Aplicatori (conectați în paralel):** Standard + Periocular.
(Spre deosebire de Tixel C, aplicatorii funcționează simultan și nu este nevoie de timp pentru răcire)
- **Tip de energie:** Încălzire directă
- **Vârf de titan:** DA
- **Sfat Zona de acoperire a vârfului:** 1 cm² (vârful feței), 0,3 cm² (vârful periorbital)
- **Greutatea sistemului (fără HP):** 6 Kg
- **Greutatea aplicatorului:** 330 g
- **Dimensiune consolă:** 26x44x30 (LxIxH)
- **Setări:** 5 -18 ms, 100 - 1000 ym

TEHNOLOGIE AVANSATĂ PENTRU ÎNTINERIREA PIELII

MEZOTIX reprezintă o soluție inovatoare în domeniul rejuvenării cutanate, fiind un sistem fracționat, non-ablativ, dezvoltat de Novoxel. Această tehnologie avansată integrează un aplicator special din titan, o inovație patentată care stabilește noi standarde în tratamentele dermatologice și estetice.

Sistemul MEZOTIX este proiectat pentru a oferi o îmbunătățire vizibilă a calității pielii fără a utiliza laser sau radiații. Prin emiterea unei călduri pure, MEZOTIX stimulează regenerarea naturală a pielii, îmbunătățind textura și reducând semnele vizibile ale îmbătrânirii. Acest proces de rejuvenare este eficient, sigur și minim invaziv, asigurând o recuperare rapidă și un disconfort redus.



MEZOTIX este deosebit de eficace pentru tratamentul zonelor delicate ale feței, inclusiv pielea peri-orbitală, pleoapele superioare și inferioare, gâtul și decolteul. Acesta oferă o alternativă remarcabilă pentru pacienții care caută soluții de rejuvenare facială fără durere și fără timp îndelungat de recuperare.

Procedura cu MEZOTIX este caracterizată prin precizie și adaptabilitate, permițând personalizarea tratamentului în funcție de specificul și nevoile individuale ale pielii fiecărui pacient. Astfel, MEZOTIX se distinge ca o opțiune preferată în rândul profesioniștilor din domeniul dermatologic și estetic, consolidându-și poziția ca lider în inovații tehnologice pentru îngrijirea pielii.

Beneficiile MEZOTIX



TRATAMENTE MULTIPLE

Întinerirea pielii, ridurile ochilor, pori deschși, acnee, vergeturi.



ZONE MULTIPLE

Față, gât, decolteu mâini, brațe & corp.



DURERE SCĂZUTĂ

Cremele analgezice pot fi folosite, de obicei nu sunt necesare.



VÂRF DE TITAN STERIL

Vârful este biocompatibil și steril în timpul tratamentului.



MIC ȘI PORTABIL

Mic și ușor de transportat.



FĂRĂ RADIAȚII

Mezotix degajează căldură directă și nu emite radiații.



Tehnologia MEZOTIX

Tehnologia MEZOTIX nu trece neobservată în domeniul cosmetic, determinând o creștere notabilă a cererilor din partea esteticienilor.

Sistemul MEZOTIX se bazează pe o acțiune termomecanică (TMA™), care se distinge prin absența utilizării tehnologiilor convenționale precum laserul, radiofrecvența, ultrasunetele sau acele pentru proceduri invazive. Această abordare inovatoare asigură un transfer direct și controlat de căldură către piele, evitând arsurile țesutului și permițând utilizarea canalelor deschise pentru administrarea eficientă a tratamentelor substanțiale.

Tehnologia fracționată și non-ablativă a MEZOTIX maximizează siguranța și eficacitatea tratamentelor, făcând-o ideală pentru îngrijirea zonelor sensibile ale feței, inclusiv regiunea periorbitală și pleoapele, precum și gâtul și decolteul. Aceasta permite, de asemenea, aplicarea tratamentelor corporale, inclusiv pentru ameliorarea vergeturilor, tratamentul cicatricilor și rejuvenarea generală a pielii.

MEZOTIX se afirmă ca o soluție de vârf pentru profesioniștii din domeniul dermatologiei și esteticii, oferind tratamente personalizate și de înaltă precizie, adaptate nevoilor complexe ale pacienților.



Inovația Tehnologiei MEZOTIX

- Versatilitatea MEZOTIX se extinde la diverse zone ale corpului, permițând tratamente personalizate pentru față, gât, decolteu, mâini, brațe și alte zone ale corpului.
- MEZOTIX transferă căldura eficient în piele, iar această căldură stimulează regenerarea colagenului și elastinei, esențiale pentru menținerea tinereții și elasticității pielii.

MEZOTIX este abordarea non-invazivă, facilitând o recuperare rapidă.

Cum funcționează tehnologia MEZOTIX

- Tehnologia MEZOTIX oferă un contact rapid și precis, aplicatorul transferă căldură direct în piele, asigurând o încălzire uniformă fără a provoca arsuri ale țesutului.
- Tehnologia MEZOTIX permite ajustarea a timpului de contact cu pielea, măsurat în milisecunde (5-12 ms), iar setările aplicatorului, permit personalizarea tratamentului în funcție de necesitățile specifice ale fiecărei zone tratate.
- Tehnologia MEZOTIX nu utilizează laser, radiofrecvență, ultrasunete sau ace, eliminând riscul de radiații de căldură directă și minimizând disconfortul pacientului.
- Tehnologia MEZOTIX oferă un aplicator cu 81 de mici piramide, acestea sunt încălzite la 400 °C.
- Tehnologia MEZOTIX are o eficiență ridicată datorată transferului direct de căldură (încălzire uniformă)

Transferul direct de căldură prin conducție

Aplicatorul este livrat inițial cu un număr de 25.000 de impulsuri, după acest prag se pot achiziționa câte 10.000 de impulsuri. Costul per impulsuri extra este menționat în lista de preț echipament.

Proiectat pentru a livra un număr maxim de 250.000 de impulsuri (aproximativ 700 tratamente faciale), capatul de tratament va fi schimbat gratuit când acest prag este atins. Pentru înlocuirea gratuită este necesară returnarea capatului uzat.



Ingrediente active

MEZOTIX este compatibil cu administrarea unei game variate de ingrediente active, care pot fi utilizate pentru a optimiza și personaliza tratamentul:

- Fără bacterii (steril): Asigură că procedura este realizată în condiții de siguranță, fără riscul de infecții.
- Fără aditivi (conservanți, parfum etc.): Minimizați riscul de reacții alergice și iritații ale pielii.
- Hidrofilic: Permite o mai bună absorbție a substanțelor active în piele.
- Viscositate redusă: Facilitează o aplicare uniformă și rapidă a tratamentelor.
- Acid hialuronic, vitamine, peptide, factori de creștere: Aceste componente sunt esențiale pentru hidratarea pielii, stimularea regenerării celulare și îmbunătățirea elasticității și fermității pielii.

Zonele de Aplicare



Frunte

Parte laterală periorbitală

Nas

Nasolabial

Perioral

Gât

Decolteu

Bărbie

Cicatrici post-acneice

Periorbital

Arcadă

- **Riduri și linii fine:** Reduce vizibilitatea ridurilor, oferind un aspect mai neted și întinerit.
 - **Hiperpigmentare:** Diminuează petele și uniformizează culoarea pielii.
- **Piele afectată de soare:** Repară și ameliorează daunele cauzate de expunerea la soare.
 - **Tonul și textura pielii:** Îmbunătățește textura generală și conferă un ton uniform pielii.
- **Strângerea pleoapelor superioare:** Ajută la redobândirea elasticității pleoapelor, oferind un aspect mai odihnit și deschis.
 - **Acnee:** Contribuie la reducerea inflamației și a apariției noi focare de acnee.
 - **Pete pigmentare / pete de vârstă:** Tratează discromiile și uniformizează aspectul pielii.
- **Cicatrici / semne post acneice:** Diminuează aspectul cicatricilor și îmbunătățește textura pielii.
 - **Vergeturi:** Reduce vizibilitatea vergeturilor, îmbunătățind aspectul și textura zonei afectate.

Soluție completă și versatilă

MEZOTIX oferă o soluție completă și versatilă pentru rejuvenarea și îmbunătățirea calității pielii, adaptată nevoilor individuale ale fiecărui pacient, fără a folosi metode invazive sau a expune pacientul la radiații.



Tratamentul și Îngrijirea Post-Procedură

Utilizarea tehnologiei MEZOTIX implică o serie de etape post-tratament care sunt cruciale pentru maximizarea beneficiilor și asigurarea unei recuperări rapide și eficiente. După procedura de rejuvenare cu MEZOTIX, pacienții pot experimenta anumite reacții temporare ale pielii, care sunt indicatoare ale procesului de vindecare și regenerare inițiat.

Reacții Imediat După Tratament

- **Roșeață Temporară:** Imediat după tratament, este comună apariția unei ușoare roșeți a pielii, care poate varia în intensitate în funcție de sensibilitatea pielii pacientului și de setările dispozitivului utilizate în timpul procedurii. Această roșeață de obicei se rezolvă în aproximativ 4-5 ore.
- **Senzatie de Ușoară Arsura de Soare:** Pacienții pot simți o senzație comparabilă cu cea a unei arsuri ușoare de soare. Aceasta este o reacție normală și indică faptul că pielea răspunde la tratamentul termic și începe procesul de auto-reparare.

Instrucțiuni de Îngrijire După Tratament

- **Evitarea Răcirii Pielii:** Este esențial ca pacienții să evite aplicarea de gheață sau răcirea zonei tratate imediat după procedură. Căldura generată de tratament joacă un rol vital în activarea și susținerea proceselor naturale de vindecare ale pielii. Prin urmare, menținerea unei temperaturi stabile în zona tratată este crucială pentru a facilita regenerarea celulară.
- **Hidratare și Protecție:** Recomandarea de bază post-procedurală include aplicarea produselor hidratante care nu conțin parfumi sau alți iritanți. De asemenea, protecția solară este imperativă pentru a proteja pielea în proces de vindecare de orice daune suplimentare cauzate de expunerea la UV.

Rezultate și Așteptări

Pacienții pot observa îmbunătățiri ale tonului și texturii pielii în săptămânile ce urmează procedurii, pe măsură ce pielea își regenerează colagenul și elastina. Această rejuvenare progresivă contribuie la diminuarea vizibilității ridurilor, cicatricilor, petelor de pigmentare și altor imperfecțiuni.

Prin urmare, MEZOTIX oferă nu doar o soluție estetică avansată pentru îmbunătățirea aspectului pielii, ci și un protocol de tratament și îngrijire post-procedură bine structurat, care asigură confortul și satisfacția pacienților pe termen lung.

Program de Tratament

Programul de tratament recomandat cu MEZOTIX include între 3 și 4 sesiuni, distribuite pe parcursul mai multor luni, pentru a maximiza eficacitatea intervenției și pentru a permite pielii să se regenereze optim între sesiuni.

Faza Imediat Post-Tratament

- **Reacții Inițiale:** După tratament, este normal ca pielea să devină ușor umflată și roșie, un efect care durează de obicei între 3 și 4 ore. Pacienții pot experimenta, de asemenea, eritem și o senzație de căldură care persistă timp de 2 până la 3 ore.
- **Recuperare Rapidă:** Unul dintre avantajele majore ale MEZOTIX este că, în general, nu necesită timp de recuperare semnificativ. Acest aspect permite pacienților să reia activitățile cotidiene imediat după tratament.

Pentru a accelera procesul de vindecare și regenerare a pielii, este recomandat să se includă în rutina post-procedurală aplicarea unei măști de colagen. Această etapă suplimentară de îngrijire contribuie semnificativ la calmarea și hidratarea pielii după tratament.

Faza de Vindecare și Rezultate

- **Apariția Crustelor:** Este posibilă apariția unor cruste fine pe piele la o zi după tratament, care se vor resorbi în mod natural în aproximativ 3 zile.
- **Observarea Rezultatelor:** Deși îmbunătățirile pot începe să fie vizibile după prima sesiune, ele devin mai pronunțate după aproximativ o lună, când procesele de regenerare a pielii sunt mai avansate.

Beneficiile Estetice Ale Tratamentului MEZOTIX

- **Îmbunătățirea Texturii Pielii:** Tratamentul ajută la netezirea pielii și la reducerea aspectului ridurilor, conferind un aspect general mai tânăr.
- **Definirea Pleoapelor:** O atenție specială este acordată zonei pleoapelor, unde MEZOTIX poate ajuta la strângerea pielii, oferind o definire mai clară și un aspect rejuvenat al ochilor.



MEZOTIX: REZULTATE GARANTATE



OCHI

- 4 tratamente Mezotix (10/500)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice



OCHI

- 2 tratamente Mezotix (8/400)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice



FAȚĂ

- 1 tratament Mezotix (10/300)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice



OCHI

- 3 tratamente Mezotix (10/500)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice



FAȚĂ

- 4 tratamente Mezotix (12/400)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice




FAȚĂ

- 2 tratamente Mezotix (12/400)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice



FAȚĂ

- 3 tratamente Mezotix (8/400 obraz & 10/500 frunte & bărbie)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice

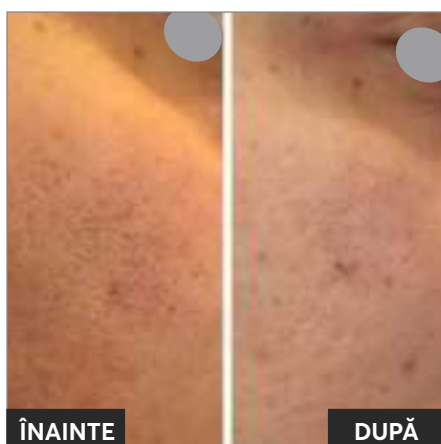

FAȚĂ

- 3 tratamente Mezotix (10/400) puls dublu
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice



OCHI

- 4 tratamente Mezotix (10/500 & 12/400)
- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice

MEZOTIX: REZULTATE GARANTATE



FAȚĂ

- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice
- 3 tratamente: 8/400, 10/500, 12/400



FAȚĂ

- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice
- 4 tratamente: 12/400



MĂINI

- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice
- 6 tratamente: 12/400



CICATRICI

- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice
- 7 săptămâni de la primul tratament (12/400)



GÂT

- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice
- 4 săptămâni de la primul tratament (12/400) și plan post-tratament (4 săptămâni)



GÂT

- Tratament non-ablativ cu aplicare de produse mezoterapeutice
- 3 săptămâni de la primul tratament (12/400) și plan post-tratament (3 săptămâni)

Mezotix™

SPECIFICATII TEHNICE

- **1 Aplicator:** Standard
(Înainte de schimbarea unuia din aplicatori cu celalalt, echipamentul trebuie să se răcească timp de 6 minute)
- **OPTIONAL:** aplicator periorbital
- **Tip de energie:** Încălzire directă
- **Vârf de titan:** DA
- **Zona de acoperire a vârfului:** 1 cm² (vârful feței), 0,3 cm² (vârful periorbital)
- **Greutatea sistemului (fără HP):** 4.5 Kg
- **Greutatea piesei de mână:** 330 g
- **Dimensiune consolă:** 26x24x24 (LxIxH)
- **Tensiune de operare:** 100-240 VAC ±10% 5A 50/60Hz



DISTRIBUȚIE DE **DISPOZITIVE MEDICALE**

Beauty One Medical distribuie produse și tehnologii de înaltă calitate, selectate din rândul celor mai inovatoare **branduri internaționale**. Ne angajăm să aducem pe piața românească **cele mai recente și eficiente** tehnologii și produse. Fiecare articol din portofoliul nostru este atent selecționat, asigurându-se că îndeplinește standarde riguroase de siguranță și eficiență.

Colaborăm strâns cu lideri recunoscuți la nivel global în domeniul **estetic-medice și medical**, pentru a introduce în **România & Bulgaria** inovații care să redefinească practicile curente și să îmbunătățească **rezultatele clinice**. Prin aceasta, sprijinim comunitatea medicală în efortul de a oferi tratamente de ultimă oră, care îmbunătățesc calitatea vieții pacienților.

De asemenea, înțelegem că nevoile pieței se schimbă și, ca răspuns, ne adaptăm continuu oferta de produse pentru a **satisface cerințele specifice ale profesioniștilor și pacienților**. Oferim **training-uri și suport tehnic** pentru fiecare produs din portofoliu, garantând că utilizatorii pot maximiza beneficiile oferite de soluțiile avansate pe care le furnizăm.

BEAUTY ONE **TRAINING CENTERS** ROMÂNIA & BULGARIA



Beauty One București Romania



Beauty One Brașov Romania



Beauty One Sofia Bulgaria



Novoxel®

tixel®

tixel²®

Mezotix™

 **BEAUTYONE™**
— MEDICAL DIVISION —

ROMÂNIA

Adresă: Bd. Libertății, Nr.22, Sector 5, București
Telefon: 0729.005 777 | **E-mail:** office@beautyone.ro

  [BEAUTYONEROMANIA](#)  [WWW.BEAUTYONEMEDICAL.RO](#)

BULGARIA

Adresă: Han Asparuh, Nr. 7, Sofia
Telefon: 0883 335 173 | **E-mail:** office@beautyone.bg

 [BEAUTYONEBG](#)  [BEAUTYONEBULGARIA](#)  [WWW.BEAUTYONE.BG](#)