

EXIMIA
concept

EXIMIA HR77 ANNIVERSARY

STANDARD & UPGRADE

pentru tratamente
CORPORALE & FACIALE
profesionale intr-un singur aparat



Anti-Aging Trophy
Romanian Anti-Aging Association
THE BEST WEIGHT LOSS
EQUIPMENT



termalia
BEST MEDICAL
EQUIPMENT EXIMIA



termalia
BEST CONCEPT FOR INTENSIVE
SLIMMING & BODY CONTOURING



COSMOBEAUTY
BEST EQUIPMENT FOR
BODY TREATMENTS



Cosmetic Awards
Asociația Cosmetologilor
din România
COSMETIC EQUIPMENT
OF THE YEAR



P.A.D.I.R.
BEST PROFESSIONAL
EQUIPMENT

Fabricat in
ITALIA

MAI PUTERNIC • MAI EFICIENT • MAI RAPID

Concept revolucionar pentru slabire intensiva, remodelare corporala si estetica faciala. Eximia revolutioneaza tehnicile de slabire profesionala cu un echipament exclusiv ce incorporeaza terapii de ultima generatie cu o putere amplificata pentru a asigura rezultate mai eficiente si mai rapide.

Noul concept Eximia Upgrade aduce imbunatatiri tehnologice exclusive!

RADIOPORATIE SQUAR-TECH

Actiune focalizata care stimuleaza productia de colagen si elastina

LASERPORATIE MULTIPOLARA

Scaderea volumului tesutului adipos intr-un timp foarte scurt si fara efecte secundare.

eximia
PLATINUM
HR77
ANNIVERSARY



MICRODERMOLIFT

Exfoliere delicata sau profunda cu actiune de oxigenare si rejuvenare faciala

ENDOFACE

Regenerare, conturare faciala, tonifiere si fermitate, cu efecte de lifting instant

ENDO RADIO MAG

Stimuleaza, reactiveaza si remodeleaza silueta in scurt timp

EXIMIA

7 TEHNOLOGII REVOLUTIONARE IN ESTETICA FACIALA & CORPORALA

eximia PLATINUM HR77 ANNIVERSARY




EXFOLIERE RAPIDA

microdermabraziune cu
particule fine de diamant



SLABIRE LOCALIZATA

laserporatie multipolata cu vibratii

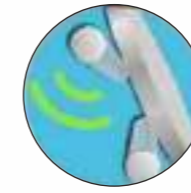

REMODELARE CORPORALA

vacuum, radiofrecventa si role magnetice



FERMITATE

radiofrecventa corporala



OXIGENARE & DETOXIFIERE

role magnetice



RECONTURARE FACIALA

vacuum facial



LIFTING FACIAL

radiofrecventa si electroporatie

GELURILE NECESARE TRATAMENTELOR EXIMIA



LipoxOne - 1000ml

Gel cu efect lipolitic avand ingrediente active precum: cafeina, fosfatidilcolina, acid hialuronic. Stimuleaza procesele naturale de ardere a grasimilor, oferind efecte de slabire localizata.



EndoxOil - 500ml

Ulei activ multifunctional ce hidrateaza si regenereaza pielea. Are la baza ulei de argan, aloe vera, retinol, ulei de jojoba si ulei esential de lamaie.



Keratox - 500ml

Produs cu efect keratolitic care indeparteaza stratul superficial de celule moarte, creste permeabilitatea pielii, curata pielea de reziduri. Confera luminozitate si un plus de elasticitate, are efect anti-aging si anti-oxidant.



EximiaOne - 150ml

Crema cu efect conductor pentru tratamentul de radiofrecventa. Are efect hidratant si anti-age datorita acidului hialuronic si a retinolului. Efect antioxidant datorita extractului de afine. Se poate folosi chiar si pe tenul sensibil datorita extractului de galbenele.



CryoGel - 500ml

Tratament cu efect racoritor, ideal pentru persoanele cu sensibilitate crescuta, predispozitie pentru inflamatii, edeme si deficiente circulatorie minora. Accelereaza procesul de ardere a grasimilor, activeaza circulatia sanguina si limfatica, reduce edemul si calmeaza iritatiile.

**Produs care se poate folosi si acasa.*



TermoGel - 500ml

Ofera un efect lipolitic, stimuleaza circulatia sanguina si arderea grasimilor. Efectul hiperemiant favorizeaza penetrarea ingredientelor active lipolitice si anticelulitice, are efect de a conduce radiofrecventa focusata care genereaza efect termic intens.

**Produs care se poate folosi si acasa.*




ReaGel - 150ml

Gel cu efect conductor, ideal pentru pielea lipsita de tonus si elasticitate de pe fata sau corp. Se utilizeaza cu tehnologia de Laserporatie pentru pielea flasca, si cu tehnologia Radioporation pentru lifting facial.

STIATI CA ADIPOCITELE?

- Tesutul adipos este o rezerva energie a organismului compus din lipide si trigliceride.
- Reprezinta 15-20% din greutatea corporala la barbati si 20-25% la femei.
- Numarul total de adipocite care va exista in viata adulta este determinat, prin hiperplazie (multiplicare) care se realizeaza in primii doi ani de viata.
- Dupa varsta de doi ani adipocitele se dezvoltă prin hipertrofie (marirea volumului).
- Corpul uman include doua tipuri de grasime sau tesut adipos, tesut adipos alb (prezent la adult) care stocheaza caloriile in exces si este asociata cu obezitatea si tesutul adipos brun (prezent la copii) care arde caloriile pentru a produce caldura.
- Adipocitele albe formeaza cea mai mare parte a tesutului adipos din corpul uman. Numarul lor este variabil, dar in medie ajunge la 35-40 miliarde.
- In cresterea patologica a masei adipocitare a unei persoane - adica obezitatea - numarul de adipocite poate ajunge la 125-130 miliarde.
- Tesutul adipos este unicul tesut al organismului ale carui dimensiuni pot suferi modificari semnificative dupa ce corpul a atins dimensiunile adulte.
- In obezitate poate sa creasca pana la de patru ori, putand atinge chiar și 60-70% din greutatea corporala.

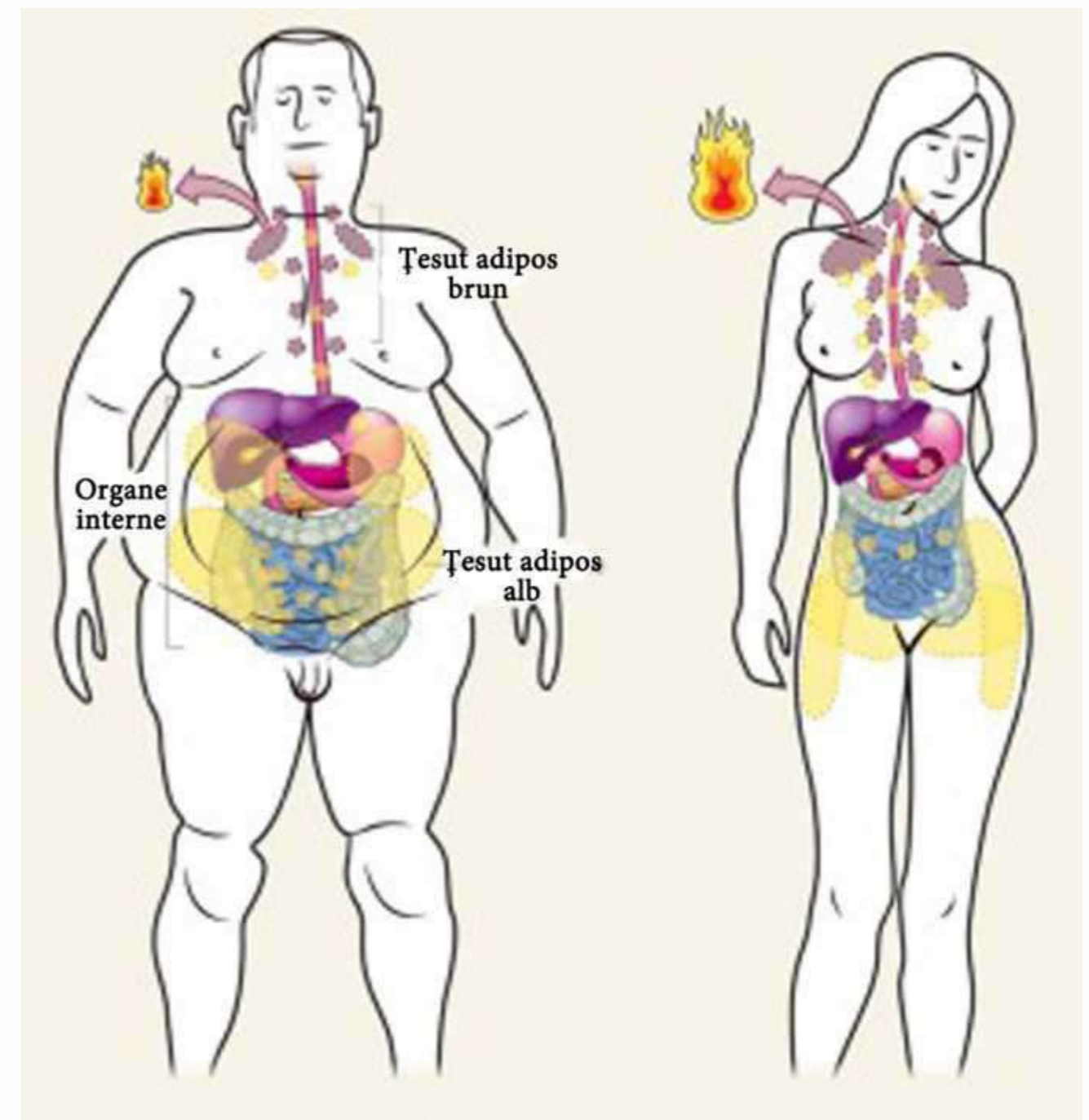

STIATI CA CELULITA?

- Este o afecțiune microvasculară-conjunctivală (afectează vasele mici de sânge și țesutul conjunctiv, de legătură între celule) cu evoluție scleroasă.
- Nu este o boală propriu-zisă, dar se situează la limita dintre normal și patologic.
- Are mai multe denumiri medicale: dermato-paniculopatie edemato-fibroscleeroasă sau paniculoză, sau liposcleroză.
- Celulita afectează femeile mai mult decât bărbații datorită distribuției diferite de grăsime, mușchi și țesut conjunctiv.
- Celulita nu este o grăsime simplă (obisnuită). Femeile nu pot scăpa de această grăsime doar cu ajutorul exercițiilor sau dietei.
- Celulita nu este o reținere de lichid, aceasta este numai o parte a problemei, însă ea este unul dintre cei mai importanți factori care atrag procesul de depunere a grăsimilor.
- Celulita nu este numai o problemă cosmetică. Este o problemă fizică, care de cele mai multe ori nu poate fi schimbată doar prin intermediul exercițiilor obișnuite și al regimului alimentar.
- Celulita nu este numai o problemă a feței în care arătam. Este o afecțiune care trebuie tratată.

EXIMIA STANDARD

LASERPORATIE

SE FOLOSESTE CU: LIPOXONE

Laser lipolitic electroporatie si vibroterapie: tehnologie patentata care ajuta la scaderea volumului tesutului adipos intr-un timp foarte scurt si fara efecte secundare. Vibratiile reprezinta o inovatie integrata, oferind o neurostimulare non-invaziva in timpul tratamentului, eficientizand procesul de lipoliza.

ENDO RADIO MAG

SE FOLOSESTE CU: ENDOXOIL

3 tehnologii revolutionare ce actioneaza simultan cu efect anticelulitic, lifting corporal si detoxifiere a organismului.

- Vacuum endermologic - elimina celulita aflata in diferite stadii;
- Radiofrecventa bipolara - stimuleaza productia de colagen si elastina, reda elasticitatea pielii si trateaza vergeturile;
- Magnetoterapia - activeaza circulatia sangvina, elimina toxinele si oxigeneaza tesutul.

Actiunea combinata a acestora asigura rezultate garantate in remodelarea corporala.

RADIOPORATIA SQUARE-TECH **SE FOLOSESTE CU: REAGEL & EXIMIAONE**

Electroporatie + Radiofrecventa: este special creata pentru a stimula productia de colagen si elastina chiar si in zonele dificile. Ajuta la tratarea ridurilor, imbunatateste elasticitatea si tonifica tesuturile.

MICRODERMOABRAZIUNE

Realizeaza atat un peeling superficial cat si unul profund, trateaza cicatricile post-acneice, are efect antirid si de lifting stimuland rejuvenarea si oxigenarea pielii.

VACUUM ENDODERMIC

Realizeaza un masaj vacuumatic complex cu efect detoxifiant si oxigenant la nivel tisular, oferind si un efect de reconturare faciala.



EXIMIA UPGRADE

MINI-RADIOLIFT

SE FOLOSESTE CU: LIPOXONE / EXIMIAONE / THERMOGEL / CRYOGEL

Aplicator pentru RADIOLIFT (RF + Electroporatie) utilizat pe zone mici (fata, barbie, gat, decolteu, sani, brate, interiorul coapselor).

TRATEAZA:

- Lipsa de tonus si imbatranirea pielii.
- Lipsa de oxigenare a tesuturilor.

Imbunatateste absorbtia transepidermica a ingredientelor active.

De asemenea, este indicat pentru inducerea caldurii profunde, in tratamentele localizate.

TINTA: Celulita si Adipozitate



RADIOLIFT

SE FOLOSESTE CU: THERMOGEL / CRYOGEL

Aplicator pentru RADIOLIFT (RF + Electroporatie) utilizat pe zone mari (abdomen, solduri, spate, fese).

TRATEAZA:

- Lipsa de tonus si imbatranirea pielii.
- Lipsa de oxigenare a tesuturilor.

Imbunatateste absorbtia transepidermica a ingredientelor active.

De asemenea, este indicat pentru inducerea caldurii profunde, in tratamentele localizate.

TINTA: Celulita si Adipozitate



MINI-ENDOLIFT

SE FOLOSESTE CU: ENDOXOIL

Aplicator ENDOLIFT (vacuum, magnetoterapie) utilizat pe zone mici (barbie, gat, brate, glezne, genunchi).

TRATEAZA:

- Lipsa de tonus si imbatranirea pielii.
- Lipsa de oxigenare a tesuturilor.
- Masajul limfatic.

De asemenea, este indicat pentru adipozitatea localizata in zone mici.

TINTA: Celulita si Adipozitate



eximia
PLATINUM
HR77
ANNIVERSARY

AVANTAJE

- Tehnologii de ultima generatie in estetica faciala si corporala;
- Rezultate atestate international;
- 22 de tipuri de tratamente;
- Tratamente nedureroase, sigure si fara reactii adverse;
- Rezultate dovedite clinic;
- O alternativa unica si revolutionara a liposuctiei chirurgicale;
- Tehnologii inovatoare create de medici;
- Rezultate garantate de la prima sedinta;
- 7 tehnologii performante inglobate intr-un singur echipament;
- Recuperarea rapida a investitiei;
- Fara consumabile costisitoare.



Exista tehnologii noi care atrag atentia lumii medicale si stiintifice. Un exemplu clar este Eximia HR77 Platinum Anniversary care ofera posibilitatea de a trata obezitatea si neregularitatile cu noua strategie tehnologica.

**STEP
BY
STEP**

eximia
PLATINUM
HR77
ANNIVERSARY

1. SLABIRE LOCALIZATA

Laserporatie

1. EXFOLIERE FACIALA

Microdermoabrazione

2. LIFTING FACIAL

Radioporatie Square-Tech

2. REMODELARE CORPORALA

Endoradiomag

3. TONIFIERE FACIALA

Vacuum Endermologic


eximia
PLATINUM
HR77
ANNIVERSARY

PASUL 1


Slabire localizata cu tehnologia laserporatie multipolara si vibratii

In timpul unei sedinte de laserporatie celula grasa trece prin mai multe faza pana la reducerea acesteia in volum.

Laserporatie multipolara cu vibratii reprezinta asocierea tehnologiei Dermoelectroporation deja cunoscută (imbunatatita in versiunea multipolara), cu terapia Low Laser Therapy 635nm si vibratiile.

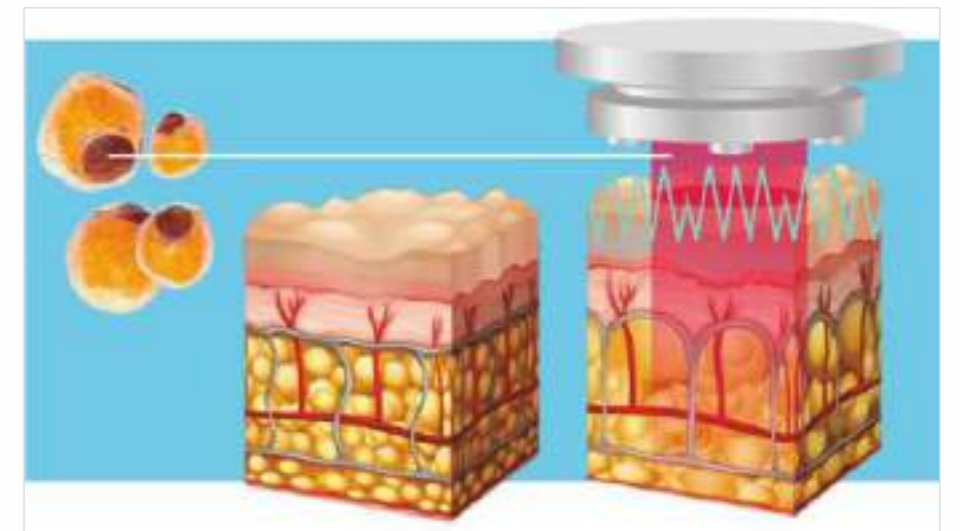


Sinergia dintre cele 3 tehnologii este o oportunitate nouă pentru tratamente de liporeductie, asta datorita faptului ca: electroporatie are rol de a „injecta” ingrediente active prin bariera epidermica, laserul (635nm) are rolul de a rupe legaturile lipidelor celulare și are ca efect crearea de pori tranzitorii în membrana celulelor, iar vibratiile ofera o neurostimulare non-invaziva care ajuta la obtinerea unor rezultate mai eficiente si mai rapide.

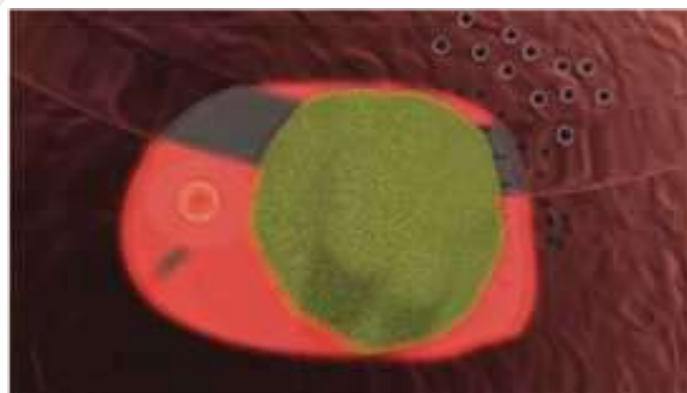


Faza 1

Stimuleaza celula grasa.

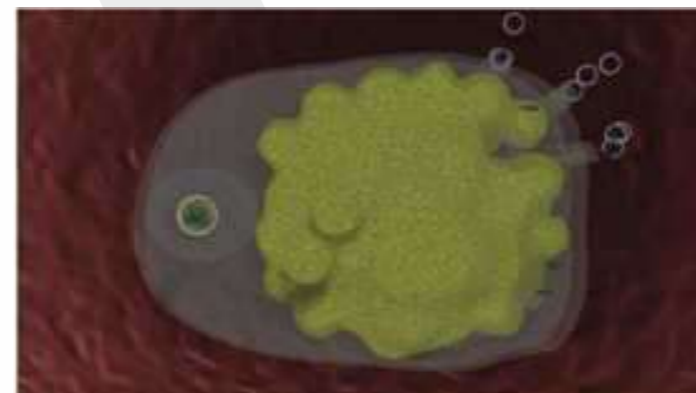


Faza 2

Activeaza procesul de lipoliza.

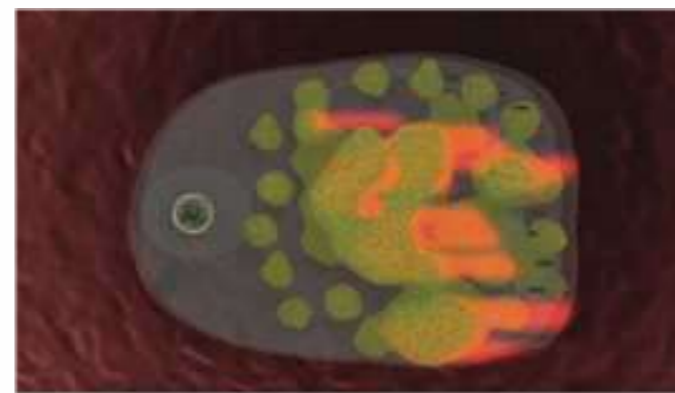

Faza 3

Dublu efect de lipoliza.

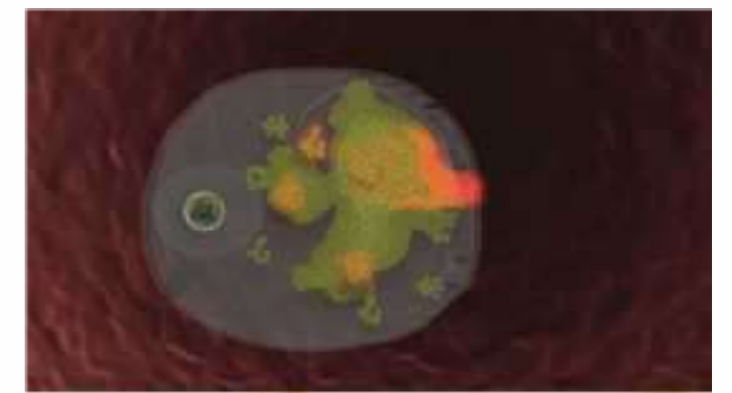

Faza 4

Reduce volumul adipocitului.

eximia
PLATINUM
HR77
ANNIVERSARY

PASUL 2

Remodelare corporala cu tehnologia EndoRadioMag


Cele 3 tehnologii ce lucreaza in sinergie ajuta la realizarea drenajului limfatic facilitand eliberarea de acizi grasi si glicerol in sistemul limfatic pentru a preveni reabsorbtiia acestora.

Masajul endodermic in 4 faze care ofera succiune/presiune/succiune/pauza, genereaza o actiune mecanica la nivelul pielii, care transmite mesaje in profunzime catre celule (fibroblaste si adipocite), generand un raspuns fiziologic (stimularea colagenului, producerea de elastina si reactivarea lipolizei), toate intensificate de actiunea simultana a radiofrecventei si a rolor magnetice.

Datorita vacuumului in patru timpi nu exista riscul aparitiei leziunilor capilare, a echimozelor si permite efectuarea drenajului chiar si in cazul persoanelor cu probleme circulatorii.



INAINTEA
tratamentului cu
EndoRadioMag

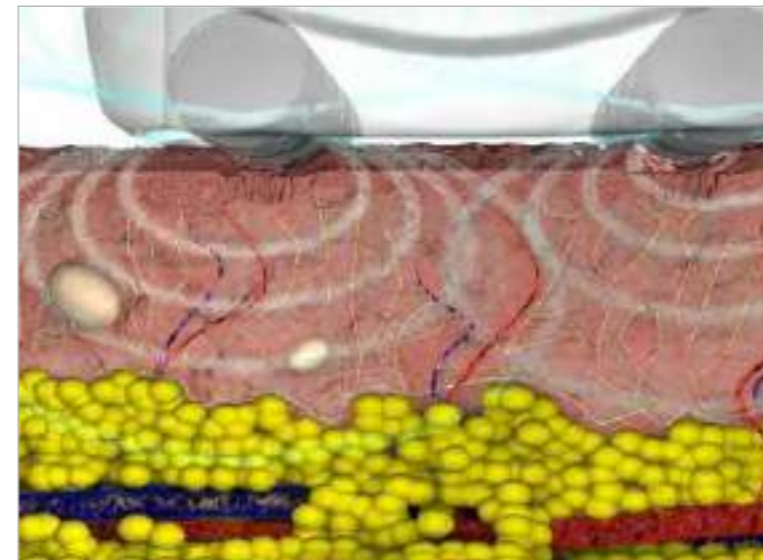

DUPA
tratamentului cu
EndoRadioMag

PROTOCOL DE TRATAMENT PENTRU TRATAMENTELE FACIALE

PASUL 1

Exfoliere cu tehnologia Microdermabraziune

Reactivarea tesuturilor se realizeaza cu ajutorul particulelor de diamant pe care le regasim in toate capetele dispozitivului. In timpul tratamentului, stratul de corneocite moarte este indepartat si se activeaza reinoirea celulara.

PASUL 2

Revitalizarea tesuturilor cu tehnologia Radioporatia Square Tech

Dupa exfolierea cu particulele de diamant, pielea devine mai permeabila, iar tehnologia Square Tech ajuta la penetrarea substantelor active pana la nivelul dermului profund, stimuland productia de colagen si elastina chiar si in zonele dificile.

PASUL 3

Oxigenarea si detoxifierea faciala cu tehnologia Vacuum Endodermic

Terapia cu vacuum endodermic realizeaza un masaj vacuumatic complex cu efect detoxifiant si oxigenant la nivelul pielii.

PROTOCOL DE TRATAMENT PENTRU GUSA

- **PASUL 1:** aplicam gel Lipoxone (gelul care se foloseste si pe corp) si folosim functia de mezoterapie aflata pe capatul de lucru Radiosquartec (timpul de lucru variaza in functie de marimea zonei si grosimea tesutului adipos). Scopul acestui pas este de a introduce in piele ingrediente cu rolul de topire a grasimii.
- **PASUL 2:** rafiofrecventa (capatul de lucru squartech) aici stabilim intensitatea in functie de gradul de toleranta la caldura iar timpul in functie de stratul de grasime. Scopul acestui pas este de stimulare a procesului de ardere a grasimilor. Se realizeaza cu gelul Lipoxone.
- **PASUL 3:** aplicarea sursei de laser la nivelul gusei. ATENTIE: se utilizeaza capatul de tratament Multilaserporatie dar acesta nu intra in contact cu pielea. De la cca 1 cm lasam laserul sa actioneze timp de 5 min. Laserul se aplica peste gelul Lipoxone.
- **PASUL 4:** masaj vacuumatic, folosim capatul de lucru Endoface, programul pe care il recomandam este Anti-age 1 sau 2. Scopul este de activare a circulatiei, metabolismului si drenaj.

3 TEHNOLOGII NOI: EXIMIA UPGRADE

MINI-RADIOLIFT FATA & CORP



Noul aplicator pentru RADIOLIFT (RF + Electroporație) utilizat pe zone mici (față, bărbie, gât, decolteu, sâni, brațe, interiorul coapselor).

TRATEAZĂ:

- Lipsa de tonus și îmbătrânirea pielii.
- Lipsa de oxigenare a țesuturilor.

Îmbunătățește absorbția transepidermică a ingredientelor active.

De asemenea, este indicat pentru inducerea căldurii profunde, în tratamentele localizate.

ȚINTA:

Celulită și Adipozitate

RADIOLIFT CORP



Noul aplicator pentru RADIOLIFT (RF + Electroporație) utilizat pe zone mari (abdomen, șolduri, spate, fese).

TRATEAZĂ:

- Lipsa de tonus și îmbătrânirea pielii.
- Lipsa de oxigenare a țesuturilor.

Îmbunătățește absorbția transepidermică a ingredientelor active.

De asemenea, este indicat pentru inducerea căldurii profunde, în tratamentele localizate.

ȚINTA:

Celulită și Adipozitate

MINI-ENDOLIFT CORP



Noul aplicator pentru ENDOLIFT (vacuum și magnetoterapie) utilizat pe zone mici (bărbie, gât, brațe, glezne, genunchi).

TRATEAZĂ:

- Lipsa de tonus și îmbătrânirea pielii.
- Lipsa de oxigenare a țesuturilor.
- Masajul limfatic.

De asemenea, este indicat pentru adipozitatea localizată în zone mici.

ȚINTA:

Celulită și Adipozitate

PROTOCOL DE TRATAMENT EXIMIA UPGRADE

TRATAMENT BOOST - SLABIRE INTENSIVA

- FAZA 1** | **MICRODERMOLIFT** pe întreaga zonă tratată, de la 30 - 50% (inserție mare 100), mișcare liniară de jos în sus.
- FAZA 2** | **KERATOX** pe întreaga zonă tratată, masați produsul până când este absorbit.
- FAZA 3** | **MICRO-RADIOLIFT + THERMOGEL** (pe zonele cu țesut adipos localizat)
- Selectați programul de radiofrecvență de nivel 8, timp de 5 minute.
 - Selectați programul de radiofrecvență de nivel 9, timp de 5 minute.
 - Selectați programul de radiofrecvență nivel 10, timp de 10 minute.
- FAZA 4** | **RADIOLIFT + LIPOXONE** pe întreaga zonă de tratat:
- Selectați programul de radiofrecvență de nivel 9, timp de 5 minute.
 - Selectați programul de radiofrecvență de nivel 10, timp de 5 minute.
- FAZA 5** | **LASERPORAȚIE + LIPOXONE:**
Împărțiți zona tratată în zone mici, distribuiți LipoxOne și folosiți electroporația nivel 3, pe fiecare zonă, timp de aproximativ 5-6 minute, cu mișcări lente, circulare.
- FAZA 6** | **ENDORADIOMAG / MINI-ENDOLIFT** (zone mici) + **ENDOX OIL** pe întreaga zonă de tratat:
Selectați programul de "Fat" în funcție de sensibilitatea pacientei (1, 2 sau 3). Nivelul de radiofrecvență 8 & 3-5 mișcări de jos în sus.

HIPOTONIE TISULARA

- FAZA 1** | **MICRODERMOLIFT** pe întreaga zonă tratată, de la 30 - 50% (inserție mare 100), mișcare liniară de jos în sus.
- FAZA 2** | **KERATOX** pe întreaga zonă tratată, masați produsul până când este absorbit.
- FAZA 3** | **DIODE PORATION LIGHT + REAGEL** opriți laserul (Diode OFF în meniu) și utilizați timp de aproximativ 20 de minute.
Utilizați Nivelul 3 de electroporație cu mișcări lente și circulare.
- FAZA 4** | **ENDORADIOMAG / MINI-ENDOLIFT** (zone mici) + **ENDOX OIL** pe întreaga zonă de tratat:
- Selectați programul de drenaj intensitatea 1, 2 sau 3 în funcție de sensibilitatea pacientului: Nivelul de radiofrecvență 5, efectuați 3 mișcări pentru fiecare manevră, de jos spre principalele stații limfatice.
 - Selectați programul de tonifiere intensitatea 1, 2 sau 3 în funcție de sensibilitatea pacientului: Nivelul de radiofrecvență 7, efectuați manevre liniare, 3 mișcări pentru fiecare manevră, de jos în sus urmărind benzile musculare.
- FAZA 5** | **RADIOLIFT / MINI-RADIOLIFT** (zone mici) + **EXIMIA ONE** pe întreaga zonă de tratat:
- Selectați programul de radiofrecvență de nivel 8, timp de 5 minute.
 - Selectați programul de radiofrecvență de nivel 5, timp de 5 minute.
 - Selectați programul de radiofrecvență nivel 10, timp de 10 minute.
- Urmăriți grupele musculare de jos în sus.

PROTOCOL DE TRATAMENT EXIMIA UPGRADE

RETENTIE DE APA

Brate: 30 min

1. Microdermolift - 2 min (1/saptamana)
2. Keratox - 2 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + CryoGel - 15 min cu intensitati diferite
4. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 6 min

Coapse si abdomen: 90 min

1. Microdermolift - 7 min (1/saptamana)
2. Keratox - 3 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + CryoGel - 60 min cu intensitati diferite
4. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 20 min

Abdomen: 40 min

1. Microdermolift - 3 min (1/saptamana)
2. Keratox - 2 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + CryoGel - 15 min cu intensitati diferite
4. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 15 min

Total: 110 min

1. Microdermolift - 10 min (1/saptamana)
2. Keratox - 5 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + CryoGel - 70 min cu intensitati diferite
4. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 25 min

Coapse : 50 min

1. Microdermolift - 2 min (1/saptamana)
2. Keratox - 3 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + CryoGel - 30 min cu intensitati diferite
4. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 15 min

*Pentru faza 5, selectati programul "DRENAJ 1 & 3" in functie de sensibilitatea clientei si intensitate 5 pentru RF

CELULITA FIBROASA

Brate: 30 min

1. Microdermolift - 2 min (1/saptamana)
2. Keratox - 2 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne + ThermoGel - 7 min
4. Dioda Poration Light + LipoxOne - 5 min
5. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 5 min
6. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne - 5 min
7. Radiolift/Mini-Radiolift + EximiaOne - 4 min

Coapse si abdomen: 90 min

1. Microdermolift - 6 min (1/saptamana)
2. Keratox - 4 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne + ThermoGel - 20 min
4. Dioda Poration Light + LipoxOne - 7 min
5. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 20 min
6. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne - 5 min
7. Radiolift/Mini-Radiolift + EximiaOne - 20 min

Abdomen: 40 min

1. Microdermolift - 2 min (1/saptamana)
2. Keratox - 2 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne + ThermoGel - 10 min
4. Dioda Poration Light + LipoxOne - 5 min
5. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 6 min
6. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne - 5 min
7. Radiolift/Mini-Radiolift + EximiaOne - 10 min

Total: 110 min

1. Microdermolift - 10 min (1/saptamana)
2. Keratox - 5 min
3. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne + ThermoGel - 30 min
4. Dioda Poration Light + LipoxOne - 15 min
5. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 25 min
6. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne - 5 min
7. Radiolift/Mini-Radiolift + EximiaOne - 20 min

Coapse : 50 min

1. Microdermolift - 3 min (1/saptamana)
2. Keratox - 2 min
3. Radiolift/Mini-radiolift + LipoxOne + ThermoGel - 15 min
4. Dioda Poration Light + LipoxOne - 5 min
5. Endoradiomag/Mini-Endolift + EndoxOil - 10 min
6. Radiolift/Mini-Radiolift + LipoxOne - 5 min
7. Radiolift/Mini-Radiolift + EximiaOne - 10 min

*Pentru faza 5, selectati programul "DRENAJ 3 & CELULITA FIBROASA" in functie de sensibilitatea clientei si intensitate 5-7 pentru RF

Magnifica

3 TEHNOLOGII REVOLUTIONARE ACTIUNE SINERGICA SI COSMETICE BIOMOLECULARE

CRIO Ultrasunete si CRIO Electroporatie intr-un singur echipament.
Solutii de Biorevitalizare si Biostimulare pentru fata, gat si decolteu.

CE OFERA?

Magnifica ofera biorevitalizare naturala si eficienta, regenereaza pielea in profunzime, facand pielea mai tonifiata, compacta si neteda, fara bisturiu sau ace, in comfort maxim si intr-un mod total natural.

Eficacitatea si siguranta tehnologiei Magnifica sunt documentate prin studii clinice si documentari aprofundate, recunoscute si validate de literatura stiintifica.

Fiecare tratament este asociat cu un ser specific, potrivit pentru tipul de ten.

CRIO ULTRAPORATIE

CRIO + ULTRASUNETE + ELECTROPORATIE

CRIO UltraPoratia este un concept brevetat de Eximia. Sistemul avansat de administrare transdermica a substantelor active asociat cu criostimularea, permite penetrarea la nivelul dermului a ingredientelor biomoleculare.



RE←←AGE

Magnifica este un concept inovator si exclusiv care mixeaza beneficiile tehnologiei de crio ultrasunete si crio electroporatii cu serurile active REAGE. Aplicate simultan si sinergic, ofera efect de biorevitalizare si bioregenerare pielii fetei, gatului si decolteului.

REZULTATE DOVEDITE CLINIC



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA

REZULTATE DOVEDITE CLINIC



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA

REZULTATE DOVEDITE CLINIC



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA

REZULTATE DOVEDITE CLINIC



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA



INAINTE

DUPA

Vedetele din Romania recomanda procedurile efectuate cu Eximia HR77 Platinum Anniversary!



Catalina Grama
Actrita

“Intotdeauna am fost genul de fata/femeie cu coapse mai voluminoase, nu filiforme. Dupa ani de diete si tot felul de activitati sportive lucrurile nu s-au schimbat foarte tare. Primul loc unde “pun” grasime e pe coapse. Si un pic pe burta. Nu va mai spun ca abdomenul meu e destul de afectat dupa cea de a doua nastere, chiar daca au trecut aproape 4 ani de atunci. Asa ca m-am hotarat sa le imbunatatesc pe amandoua, pentru ca am realizat ca nu pot face asta numai prin sport si dieta.

Am anumite depuneri cu care nu se poate lupta nimeni. Incearc insa acum Eximia Platinum Vibration. M-a convinsa echipa Diane sa incerc mai multe alternative. Ce anume face Eximia in cateva cuvinte... E unica tehnologie care subtiaza, remodeleaza, trateaza celulita si reface aspectul pielii intr-un singur tratament. Va spun atat: dupa cea de a patra sedinta lucrurile se vad altfel.

Observ multe imbunatatiri mai ales pe partea interna a coapsei. Ieri stateam cu un picior sub mine (pozitia clasica:)) si mi-am dat seama ca a disparut o parte din celulita care ma deranja. Azi am venit la sedinta cu o retentie clara de apa (eram pufoasa de-a dreptul) pentru ca am mancat mai sarat in Delta si dupa o ora de tratament sunt vizibil dezumflata/subtiata datorita efectului drenant al Eximiei.

Asa ca... daca vi-l recomand? Cand aveti timp sa va faceti programare?!”



Vedetele din Romania recomanda procedurile efectuate cu Eximia HR77 Platinum Anniversary!



Xonia
Artist

“Știți că eu sunt o persoană activă și că dintotdeauna mi-a plăcut să fiu în formă, mănânc cât mai sănătos, am vrut să am o alimentație echilibrată iar rezultate obținute de mine să se mențină pe termen lung.

De ceva timp m-am hotărât să combin stilul de viață sănătos cu tratamentele corporale și aparatură performantă, de ultimă generație. Tratamentul meu preferat este cel cu aparatul Eximia, pe care îl realizez de ceva timp la Chic Salon Izvor, iar rezultatele sunt vizibile după 1 ședință! Deci acum poți slăbi localizat rapid, poți scăpa de celulita inestetica, poți avea o piele fermă cu un minim de efort, și mai ales, fără durere.

Cu acest aparat-minune se pot face atât tratamente corporale, cât și faciale, acesta dispunând de 22 de tratamente diferite! EximiaHR77 Platinum Anniversary se bazează pe 7 tehnologii avansate printre care și laserporația multipolară cu vibrații ce înlocuiește cu succes liposucția chirurgicală și scade volumul țesutului adipos într-un timp foarte scurt și fără efecte secundare.

Mi se pare genial acest aparat mai ales că rezultatele se vad de la prima ședință, în centimetri, fără efecte secundare. Va recomand să încercați și voi macar o ședință cu Eximia, sigur o să vă încante la fel de tare ca și pe mine! Il găsiți la Chic Salon Izvor iar pe site-ul lor chicsalon.ro puteți vedea rezultatele obținute în urma tratamentelor.”



Vedetele din Romania recomanda procedurile efectuate cu Eximia HR77 Platinum Anniversary!



Mihaela Buzarnescu

Jucator profesionist de tenis

“Aramata mea de aliati pentru a reveni pe teren in cea mai buna forma include si tratamentele cu aparatul Eximia de la @beautyoneromania, pe care il gasiti la @chicsalon_izvor.”



Simona Taranu

Prezentatoare TV

Am o veste buna si una mai putin buna. Incepe sa fie destul de aglomerat in saloane, la remodelare corporala. Toata lumea vrea sa fie slim, fara celulita si alte imperfectiuni. Vestea buna: un al doilea aparat Eximia este pe drum!



Anamaria Dodan

Cienta

“Astazi am încercat noua procedură de slăbire și tonifiere Eximia! Pot spune doar că este SUUUUUPER!”

Vedetele din Romania recomanda procedurile efectuate cu **Eximia HR77 Platinum Anniversary!**



Adina Buzatu
Fashion Stylist



Carmen Brumă
Tehnician nutriționist



Sensy
Influencer




Ioana Ginghină
Actriță



Maria Pașca
Blogger



Oana Zamfir
Prezentatoare DIGI

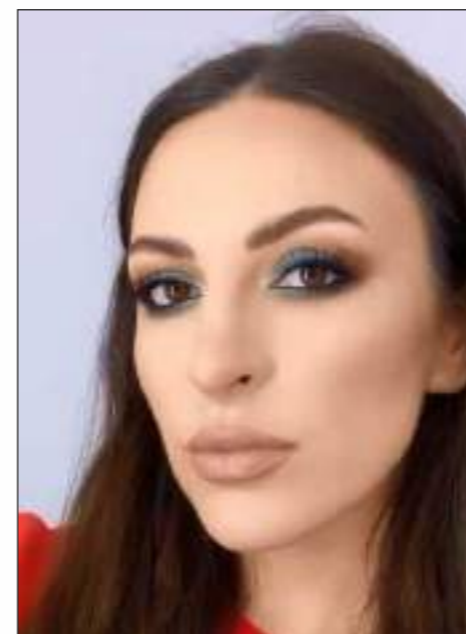

Anca Ciotă
Prezentatoare Kanal D



Andreea Antonescu
Cântăreață

Vedetele din Romania recomanda procedurile efectuate cu Eximia HR77 Platinum Anniversary!



Roxana Ciuhulescu
Prezentatoare TV



Simona Pătruleasa
Prezentatoare Kanal D



Ana Maria Prodan
Impresar Sportiv



Livia Graur
Prezentatoare Prima TV




Nico Cântăreață



Cristina Herea
Jurnalist



Dana Savuică
Fotomodel & Prezentatoare TV

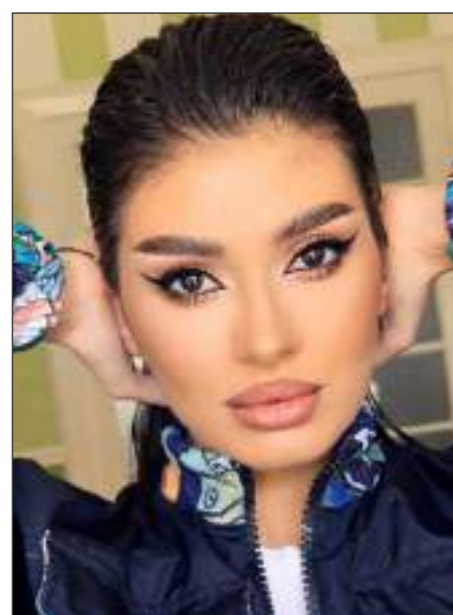

Marisa Paloma
Influencer



Marian Capet
Influencer & Salon Owner



Raluca & Denisa (BAMBI)
Cântărețe



Alexia Talavutis
Cântăreață



Emy Alupei
Cântăreață

Aparitii MEDIA in Romania

Eximia HR77 Platinum Anniversary



Tratament revolucionar de slabire
si remodelare corporala - EXIMIA HR 77



EXIMIA HR 77 la
Star Matinal



Slabesti 10 kg intr-o luna cu
EXIMIA HR 77!



Xonia isi mentine silueta cu
EXIMIA HR 77



EXIMIA - Ultraporatie cavitacionala



Slabire rapida si localizata cu
EXIMIA HR 77



Slabire Spectaculoasa cu
Eximia



Slabire rapida cu
Eximia



Reportaj Eximia
Prima TV



Eximia HR77 reportaj
Antena 1 - Razvan si Dani



Eximia HR77 - Slabesti pana la
4 cm intr-o sedinta



Sensy - Slabire si remodelare corporala cu
Eximia HR77 Platinum Anniversary



Adina Buzatu
Mentinerea unei siluete de invidiat



Anca Ciota
Tratament de remodelare corporala



Catalina Grama (Jojo)
Remodelare corporala cu rezultate vizibile imediat

eximia
PLATINUM
HR77
ANNIVERSARY



Adresă: Bd. Libertății, Nr.22, Sector 5, București • **Telefon:** 0729.005.777 • **E-mail:** office@beautyone.ro



BEAUTYONEROMANIA



WWW.BEAUTYONE.RO